

Instrucțiuni de utilizare.
A se citi cu atenție!



Siguranță pentru proteză. **Protefix®** **Protefix®** Tablete de curățare activă

Protefix® Tablete de curățare activă au un efect antibacterian, îndepărtează placa și 99,99%* dintre bacterii.

*(as per DIN EN 1040)

Igiena orală riguroasă este necesară pentru a elimina resturile alimentare care se depun pe proteză, exact în același fel ca și pe dinții naturali. În cazul în care resturile alimentare ajung sub proteză, acestea pot conduce la inflamații dureroase, deoarece flora bucală naturală este perturbată pe perioada purtării protezei și este imposibilă autocurățarea completă a cavității bucale. În acest caz, nu trebuie să vă bazați numai pe perișta de dinți, ci mai degrabă pe o tabletă bună de curățare a protezei.

Tabletele de curățare activă **Protefix®** sunt foarte eficiente în acest caz, datorită capacității mari de curățare și a acțiunii lor puternic odorizante.

Datorită compoziției, tabletele de curățare activă **Protefix®** au suficient oxigen pentru a curăța proteza independent, riguros și rapid, fără a ataca materialul acesteia.

Dozare și mod de aplicare:

Dizolvați o tabletă de curățare activă **Protefix®** într-un pahar cu apă caldă (100-200 ml,

la aproximativ 35°C) și așezați proteza sau aparatul dentar imediat în pahar. Proteza sau aparatul dentar ar trebui să fie complet acoperite de soluția de curățare. Curată și proaspătă în 3 minute, dezinfectată în 10 minute. Curățarea peste noapte este, de asemenea, posibilă. Înainte de așezarea protezei în cavitatea bucală, aceasta se scoate din soluție și se clătește bine sub jet de apă.

Vă rugăm să rețineți următoarele sfaturi importante:

Se aplică numai în afara gurii. Evitați contactul cu ochii. Produsul nu trebuie depozitat la îndemâna copiilor mici.

La înghițirea accidentală a unei tablete de curățare sau a soluției, vă rugăm solicitați imediat sfatul medicului.

A se păstra într-un loc răcoros și uscat.

A se păstra la temperaturi sub 25° C.

Ingrediente:

Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Citric Acid, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

Data revizuirii textului: 11/2013

Distribuitor:


Queisser
PHARMA

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg-Germany
www.queisser.com

Producător:
Helago-Pharma GmbH
An der Schleifmühle 2,
50374 Erftstadt
Germany


0481



Информация за употреба.
Моля, прочетете внимателно!



Сигурност за Вашите протези. Протефикс®

Протефикс® Почистващи таблетки

Протефикс® Почистващи таблетки имат антибактериален ефект, премахват плаката и 99.99* % от бактериите.

* (съгласно DIN EN 1040)

За да се премахнат хранителните остатъци, които се задържат по протезата, точно както и по естествените зъби, е нужна щателна орална хигиена. Задържаните под протезата частици биха могли да причинят болезнени възпаления, тъй като самото носене на протезата смущава естествената орална флора и устната кухина не може да се самоочисти напълно. Затова, в тези случаи не бива да се разчита единствено на четката за зъби, а да се използват и качествени почистващи таблетки.

Протефикс® Почистващи таблетки са особено ефективни в тези случаи, тъй като имат както отлична почистваща сила, така и силен дезодориращ ефект. **Протефикс®** Почистващи таблетки действат, като освобождават активен кислород в достатъчно количество, за да осигурят пълно почистване на протезата за кратко време, като същевременно не увреждат материалите, от които е направена.

Дозирание и начин на приложение:

Разтворете една таблетка от **Протефикс®** Почистващи таблетки в чаша с хладка вода (100-200 мл, около 35 °C) и веднага след това поставете протезата или ортодонтското апаратче в чашата. Протезата/ортодонтското апаратче трябва да е напълно покрита от течността. След 3 минути протезата е чиста и освежена, а след 10 минути – дезинфекцирана. Възможно е и да оставите протезата в чашата през цялата нощ. Извадете протезата и изплакнете на течаща вода, преди да я сложите отново в устата.

Важни съвети, моля, обърнете внимание:

Прилагайте само извън устата! Избягвайте контакт с очите! Съхранявайте на недостъпно за малки деца място! В случай на поглъщане на таблетка или на получения разтвор по невнимание, моля незабавно потърсете медицинска помощ! Съхранявайте на хладно и сухо.

Не съхранявайте при температура над 25 °C.

Състав: Калиев кароат, Натриев бикарбонат, Натриев карбонат, Лимонена киселина, Сорбитол, ВП/ВА кополимер, Натриев лаурил-сулфат, Натриев лаурил-сулфоацетат, Аромат, CI 73015.
Последна редакция на текста: 11/2013.



CE
0481



Произведено от
Helago-Pharma GmbH
An der Schleifmühle 2,
50374 Ertstadt
Germany

3 a Queisser Pharma


Queisser
PHARMA

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
D-24941 Flensburg-Germany
www.queisser.com

Представителство за България:
ТП КУАЙСЕР ФАРМА,
София, бул. Климент Охридски 25,
Тел.: (02) 4412764