



**Gebrauchsinformation!  
Bitte aufmerksam lesen!**

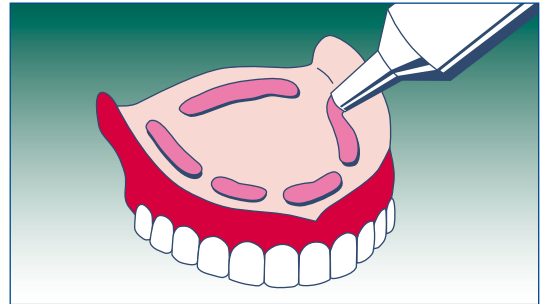

## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Haft-Creme Extra-Stark Frisch

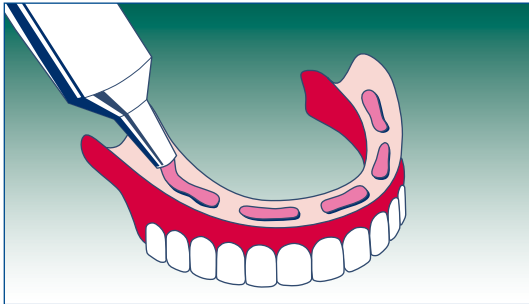

Verbesserte Rezeptur. Ohne Zinksalz. Auch für Teilprothesen geeignet.

#### Anwendung:

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

#### Dosierung und Art der Anwendung:

Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme.  
Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark Frisch in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark Frisch versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen!  
Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Bitte die **Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark Frisch sparsam dosieren, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann. Die Anwendung von Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

#### Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

#### Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

#### **Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

- Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

#### Zusammensetzung:

**Protefix®** Haft-Creme Extra-Stark Frisch enthält: Gemisch der Natrium-/ Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Siliciumdioxid, Gebleichtes Wachs, Menthyl-Lactat, Pfefferminzextrakt, Krauseminzöl, Pfefferminzöl, Azorubin, Methyl-4-Hydroxybenzoat.  
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 10/2016.

  
**Queisser**  
PHARMA



D-24914 Flensburg  
www.queisser.de

# Protifix® Haft-Creme Frisch

Extra-Stark mit Nass-Haftkraft



- 1. Frische:** mit extra frischem Minzgeschmack, für ein langanhaltendes Frische-Gefühl
- 2. Nass-Haftkraft:** direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 3. Starker Halt:** Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung
- 4. Schutz:** hilft das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern, Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort.

## Protifix® Haft-Creme Extra-Stark Frisch

sorgt mit ihrem frischen Minzgeschmack für ein angenehmes Mundgefühl und sympathischen Atem. Wirkt langanhaltend und sorgt für ein sicheres Tragegefühl der Dritten, selbst bei schwierigen Haft-Problemen.



## Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protifix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

### Wie haben Sie **Protifix®** kennengelernt?

- Apotheker     Bekannte  
 Zahnarzt     Werbung

### Warum verwenden Sie Haft-Creme?

- bei mir hält nichts anderes  
 weil die Prothese sicher und lange haftet  
 weil ich die Haft-Creme direkt auf die nasse Prothese auftragen kann

### Sind Sie zufrieden mit **Protifix®** Haft-Creme Frisch?

- Ja     Nein, weil \_\_\_\_\_

### Verwenden Sie noch andere **Protifix®** Produkte?

- Ja, und zwar \_\_\_\_\_  
 Nein

Ich bin \_\_\_\_\_ Jahre alt und verwende **Protifix®** Haft-Creme **Frisch** seit \_\_\_\_\_.

### Ihre persönlichen Daten

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser Pharma GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: [www.protifix.de](http://www.protifix.de) oder E-mail: [info@queisser.de](mailto:info@queisser.de).